




INSTRUCCIONES DE USO


CONEXIÓN

-ACCESO CON JERINGA LUER LOCK O SISTEMA DE INFUSIÓN :
Enroscar hasta obtener una conexión segura

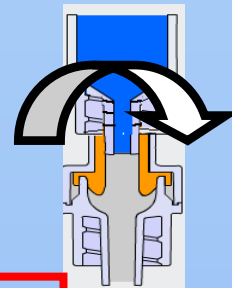


ii DESINFECTAR LA MEMBRANA SUPERFICIAL ANTES DEL ACCESO AL DISPOSITIVO!! ⁽¹⁾

-ACCESO CON JERINGA LUER:
Conectar presionando para abrir el canal de paso

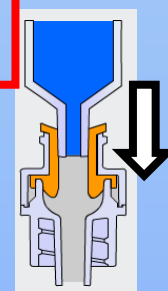

DESCONEXIÓN

DESCONEXIÓN: Desconectar girando la jeringa o sistema, ya sea Luer o Luer Lock

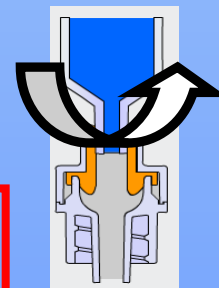

ii ANTES DE RETIRAR LA JERINGA CERRAR LA LLAVE DE 3 PASOS Y/O CLAMPAR LA LINEA !!

LAVADO

Lavar ANTES y DESPUES de cada uso y/o cada 6-8h.

El lavado mediante FLUJO PULSÁTIL es más eficaz que el lavado continuo⁽²⁾, sobretodo después del paso de fluidos densos (sangre, lípidos,...)



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1), CDC Guidelines 2010

(2), Jacques Merckx^{1,2}, Gérard Guiffant², Jean-Jacques Durusse², atrice Flaud², Jean-Pierre Vigier³, Patrice Mousset³¹ Hôpitaux de Paris, Necker-Enfants Malades, 1 square La Bruyère, Paris 75009, France² MSC-UMR 7057, université Paris-Diderot