



## REVISION ARRITMIAS MONITORES

### 1.- AJUSTES EN MONITOR:

Pulsar cuadrado de ECG → "Configurar ECG" → Bajar en menú hasta "Análisis de arritmias": Botón en "ON" → Bajar en menú hasta "Configurar alarmas de arritmias": Aparece una tabla con múltiples parámetros:

(cuantas más selecciones más alarmas se generan)

- Prioridad de alarmas: Baja, Media, Alta.
- Configurar alarmas: ON en todas (o selección)
- Registrar alarmas: ON en todas (o selección).
- Selección Unidad Ictus Torrecardenas: taquicardias, Bradicardias, Bigeminismo, Trigeinismo, Arritmias, ritmo irregular, fibrilación auricular.

(para ajustar límites de alarmas: clicar en cada parámetro y modificar límites si es necesario)

(para revisar la alarmas de arritmias: Botón "revisar" de franja inferior → "Revisión eventos de alarma" → "Revisión alarmas fisiológicas" → Aparece listado de alarmas e ir clicando).

(al final del menú de configurar alarmas de arritmias, está "Aprender arritmias", que se supone que va descartando trazos sin importancia).

*\*\* Para evitar alarmas sonoras en el monitor que molesten, en configurar monitor activar modo privado.*

### 2.- AJUSTES EN CENTRALITA:

Monitor real: en tiempo real.

Revisar: Revisa por parámetro y franja temporal. Seleccionar inicio-fin temporal → Seleccionar "Tipo de Onda" (I, II, RES, SPO2) → Modo visualización (Onda simple / todas las ondas). Ajustar velocidad de trazo si se desea.

Vista Alarmas:

- Seleccionar: "Tipo de Alarma": ALAR FIS (fisiológicas y deseleccionar alarmas técnicas: p.ej se cae en pulxi), "Nivel de alarma", "Inicio" y "Fin" de intervalo a revisar.
- y "ACTUALIZAR LISTA" (abajo a la izquierda), debajo aparece listado de alarmas de arritmias, se clican y la derecha aparece el registro.

(si previamente seleccionamos en el monitor las alarmas en ON o cambiamos la prioridad de los parámetros que nos interesen a ALTA, podemos limitar las alarmas que nos muestra ahora).

Vista tendencias:

- Seleccionar franja temporal.
- Seleccionar "grupo de tendencia" (por defecto "ESTANDAR", So2, FR, NIBP ... se puede crear grupo como por ejemplo "TA y FC" en un mismo pantallazo, bajar en menú a "Ajustes de usuario: seleccionar ítems y definir nombre).
- Seleccionar "RES": intervalos temporales que muestra (por defecto cada segundo) a por ejemplo cada minuto (establece medias).
- Mostrar datos como "curva de tendencias" o como "tabla de tendencias".