

KLS MARTIN

ENCENDER

Botón negro situado a la derecha
Esperar calibración

POLIPECTOMÍA COAGULACIÓN

M1 (AZUL): 1 clic

RUEDA GRIS: Girar para ajustar potencia (30 watt).
Pulsar para aceptar (pulsar rueda gris)

CORTE

M1 (AMARILLO): 1 clic

RUEDA GRIS: Girar para ajustar potencia (30 watt).
Pulsar para aceptar (pulsar rueda gris)

ARGÓN

M2 (AZUL): doble clic

RUEDA GRIS:
Girar izquierda hasta seleccionar ARGON ENDO
Queda resaltado en un recuadro negro
Pulsar para aceptar (pulsar rueda gris)

BOTÓN MENÚ

Pulsar

RUEDA GRIS

Girar izquierda hasta seleccionar PEDAL
Pulsar aceptar (pulsar rueda gris)
Girar rueda gris hasta seleccionar PEDAL AZUL (central)
Queda resaltado en un recuadro negro
Pulsar aceptar (pulsar rueda gris)

PURGE

Pulsar varias veces para purgar