

**UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO**

# **ERBE**

## **POLIPECTOMÍA**

### **COAGULACIÓN**

Pulsar botón de ciclo para seleccionar Forced

Pulsar flechas para ajustar potencia a 40 vatios (30 a 50 vatios).

Utilizar pedal Azul

### **CORTE**

Pulsar flechas para ajustar potencia 40 vatios (30 a 50 vatios).

Endocut: desactivado

Utilizar pedal Amarillo

## **ARGÓN**

Desconectar el cable activo del Electrobisturí.

Conectar el cable de la unidad de argón al Electrobisturí en el lugar donde estaba el cable previamente desconectado

Pulsar botón de ciclo hasta que aparezca A

Pulsar Prog: elegir programa 1

Ajuste manual

Pulsar flechas para ajustar potencia 60 (50-80 vatios)

Pulsar flujo para ajustar a 1,5 (1 a 2,5 l/min.)

### **PURGE**

Pulsar para purgar

Utilizar pedal Azul

## **ESFINTEROTOMÍA**

### **BILIAR**

Corte: 100 vatios

Argón: A 70

Coagulación

Forced 80 vatios

Soft 80 vatios

Bipolar ----

Efecto 3

Endocut: activado

Utilizar pedal Amarillo

### **PANCREÁTICA**

Mismos ajustes de potencia

Endocut: desactivado

Utilizar pedal amarillo

## **DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA**

### **COLON**

Circunferencial	Endocut	50 w
Disección	Forced coagulation	40 w
Hemostasia coagrasper	Soft coagulation	70 w

Hiriyama Endoscopy 2012; 11: 1024-1030

### **ESTÓMAGO**

Circunferencial	Endocut	80-120 w efecto 3
Disección	Forced coagulation	50 w
Disección tejido submucoso fibroso	Endocut	80-120 w efecto 3
Hemostasia coagrasper	Soft coagulation	80 w

Uedo. Annals of Gastroenterology 2012; 25: 281-290