

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO

ERBE

POLIPECTOMÍA

COAGULACIÓN

- Pulsar botón de ciclo para seleccionar Forced
- Pulsar flechas para ajustar potencia a 40 vatios (30 a 50 vatios).
- Utilizar pedal Azul

CORTE

- Pulsar flechas para ajustar potencia 40 vatios (30 a 50 vatios).
- Endocut: desactivado
- Utilizar pedal Amarillo

ARGÓN

- Desconectar el cable activo del Electrobisturí.
- Conectar el cable de la unidad de argón al Electrobisturí en el lugar donde estaba el cable previamente desconectado
- Pulsar botón de ciclo hasta que aparezca A
- Pulsar Prog: elegir programa 1
- Ajuste manual
 - Pulsar flechas para ajustar potencia 60 (50-80 vatios)
 - Pulsar flujo para ajustar a 1,5 (1 a 2,5 l/min.)

PURGE

- Pulsar para purgar
- Utilizar pedal Azul

ESFINTEROTOMÍA

BILIAR

- Corte: 100 vatios
- Argón: A 70
- Coagulación
 - Forced 80 vatios
 - Soft 80 vatios
 - Bipolar ----
- Efecto 3
- Endocut: activado
- Utilizar pedal Amarillo

PANCREÁTICA

- Mismos ajustes de potencia
- Endocut: desactivado
- Utilizar pedal amarillo

**Ajustes para Disección Endoscópica Submucosa según instrumento.
Datos facilitados por Olympus.**

Órgano	Instrumento ESD	Procedimiento	Modo	Potencia (W)
Estómago	FD-410L Coagrasper	Hemostasia	Soft Coag 80W	80
		Hemostasia	Forced Coag	80
		Hemostasia preventiva	Soft Coag	80
		Hemostasia preventiva	Forced Coag	80
	FD-420L HotBite	Marcado	Forced Coag	35
		Precorte	AutoCut Effect 3	120
	FD-430L HotClaw	Incisión circunferencial	AutoCut, Effect 3	120
	KD-1L-1	Incisión	Principiante: EndoCut, Effect 3	60
		Incisión	Experto: AutoCut, Effect 3	60
		Marcado	Forced Coag	20
		Precorte	AutoCut, Effect3	60
		Marcado	Forced Coag	20
		Precorte	EndoCut, Effect 3	80
		Precorte	AutoCut, Effect 3	120
	KD-610L	Incisión circunferencial	EndoCut, Effect 3	80
		Disección submucosa	EndoCut, Effect 3	80
		Hemostasia	Forced Coag	50
		Hemostasia preventiva	Forced Coag	50
		Incisión circunferencial	EndoCut, Effect 3	120
		Submucoal Dissection	EndoCut ,Effect 3	120
		Hemostasia	Forced Coag	50
		Incisión circunferencial	EndoCut, Effect 3	120
			Soft Coag.	50
		Hemostasia	Si fuera adicionalmente necesario durante escasos segundos : Forced Coag	40
	KD-611L (IT2)	Incisión circunferencial	EndoCut, Effect 3	80
		Disección submucosa	EndoCut, Effect 3	80
			Alternativamente: Forced Coag	50
		Hemostasia	Forced Coag	50
	KD-620L (Hook-Knife)	Marcado	Forced Coag	40
		Incisión circunferencial	Forced Coag	60
		Disección submucosa	Forced Coag	60
	KD-630L (FlexKnife)	Marcado	EndoCut Effect 3	80
		Incisión circunferencial	EndoCut, Effect 3	40
		Disección submucosa	Forced Coag	40-50
		Hemostasia	Forced Coag	40-50
	KD-640L (TTKnife)	Marcado	Forced Coag	30
		Incisión circunferencial	EndoCut / AutoCut, Effect 3	120
		Disección submucosa	Forced Coag	60
		Hemostasia	Forced Coag	60

		Hemostasia preventiva	Forced Coag	60
Estómago	KD-650-L (DualKnife)	Marcado	Forced Coag	30
		Incisión circunferencial	EndoCut Effect 2/3	60
		Dissección submucosa	Forced Coag	30
		Hemostasia	Forced Coag	40
Colon	FD-411QR/UR Coagrasper	Hemostasia	Soft Coag	50
		Hemostasia	Soft Coag, Effect 5	50
		Hemostasia	Soft Coag, Effect 5	50
	KD-620QR/UR (Hook-Knife)	Incisión circunferencial	EndoCut, Effect3	80
		Dissección submucosa	Forced Coag	40-50
		Hemostasia	Forced Coag	50
	KD-650-U (DualKnife)	Marcado	Forced Coag	30
		Incisión circunferencial	EndoCut Effect 2/3	30
		Dissección submucosa	Forced Coag	30
		Hemostasia	Forced Coag	30
Esófago	KD-650-L (DualKnife)	Marcado	Forced Coag	30
		Incisión circunferencial	EndoCut Effect 2	30
		Dissección submucosa	Forced Coag	30
		Hemostasia	Forced Coag	35