

REPROCESAMIENTO ENDOSCOPIOS

Limpieza exterior y de canales

Antes de desconectar el endoscopio de la fuente de luz y del videoprocador



Limpieza superficie exterior

Con una celulosa empapada en solución jabonosa
Se eliminarán por arrastre los restos de sangre, moco, etc.



Limpieza de canales

Sumergiendo la punta del endoscopio
Solución de líquido enzimático
Canal biopsia: pulsar botón aspiración 15 segundos
Canal aire/agua: pulsar a fondo botón insuflación 15 segundos



Desconectar cable espiral
Retirar tubo aspiración y de aire / agua
Retirar endoscopio de fuente de luz



Evitar golpes en el transporte
Enroscar el endoscopio
Sujetar extremos y cabezal de mandos

Sala de Desinfección



Retirar válvulas y tapón canal biopsia

Cepillo corto
Limpieza individual para eliminar restos



Cepillado de superficie exterior

Cepillo corto
Cabezal, punta distal, conectores de válvulas



Cepillado canal biopsia

Cepillo largo
Desde orificio canal a punta distal y hacia extremo conexiones




Termodesinfectadoras



Colocar endoscopio en orden

- Cabezal
- Extremo de conexiones en espiral interior
- Caña endoscopio en espiral exterior

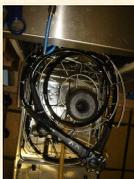

Conectar:

- Tapón estanqueidad conexiones eléctricas
- Tubos irrigación a canales aspiración, aire/agua, biopsia
- Tubo canal auxiliar



Cestillo

- Válvulas
- Tapón canal biopsia
- Otros utensilios



Puesta en marcha

- Cerrar puerta
- Seleccionar programa
- Botón verde
- Al finalizar retirar endoscopio

Almacenamiento



- Vertical en percha
- Extremos hacia abajo
- Secar válvulas y tapón