

| APLICACIÓN                             | INSTRUMENTO RECOMENDADO | VIO 3 CUT                                    | VIO 3 COAG                         | APC       |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Polipsectomía/EMR<br>estómago/ esófago | Asa de polipsectomía    | ENDocut Q, Efecto 3, Duración 1, Intervalo 6 | forcedCOAG, efecto 4,5             | No aplica |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con QuickStart |           |
| Polipsectomía/EMR<br>colon/ recto      | Asa de polipsectomía    | ENDocut Q, Efecto 2, Duración 1, Intervalo 6 | forcedCOAG, efecto 4,5             |           |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con QuickStart |           |
| Polipsectomía/EMR colon<br>derecho     | Asa de polipsectomía    | ENDocut Q, Efecto 1, Duración 1, Intervalo 6 | forcedCOAG, efecto 4,0             |           |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con QuickStart |           |
|                                        |                         |                                              | softCOAG Effect 4,0 con QuickStart |           |
|                                        | Hybridknife             |                                              | forcedCOAG Effect 4,0              |           |
| ESD Marking                            | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con QuickStart |           |
| ESD disección                          | Hybridknife             | endocUT Q, Efecto 2, Duración 3, Intervalo 3 | forcedCOAG Effect 4,0              |           |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con Quickstart |           |
|                                        | Hybridknife             | COAG Efecto 4,0                              | forcedCOAG Effect 4,0              |           |
| ESD disección dryCUT                   | Forceps monopolar       | endocUT Q, Efecto 2, Duración 3, Intervalo 3 | softCOAG Effect 6,5 con Quickstart | No aplica |
|                                        | Hybridknife             |                                              | forcedCOAG Effect 4,0              |           |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | softCOAG Effect 6,5 con Quickstart |           |
| POEM incisión                          | Forceps monopolar       | endocUT Q, Efecto 3, Duración 3, Intervalo 4 | swiftCOAG Effect 2,5               |           |
|                                        | Hybridknife             |                                              | softCOAG Effect 6,5 con Quickstart |           |
|                                        | Forceps monopolar       |                                              | swiftCOAG Effect 3,5               |           |
| POEM Miotomy                           | Monopolar Forceps       | endocUT 1, Efecto 2, Duración 3, Intervalo 3 | forcedCOAG Effect 3,0              |           |
|                                        | Esfinterotomo           |                                              |                                    |           |
|                                        | HybridAPC               |                                              |                                    |           |
| Esófago de Barrett                     | HybridAPC               |                                              |                                    |           |
| APC                                    | Sonda APC               |                                              |                                    |           |
| APC GAVE                               | Sonda APC               |                                              |                                    |           |
| APC Ablación                           | Sonda APC               |                                              |                                    |           |
| APC Colon derecho                      | Sonda APC               |                                              |                                    |           |

NO APLICA

- pulsedAPC Efecto 6,0 (rápido)
- ForcedAPC Efecto 3,0
- preciseAPC Efecto 7,0 pulsed APC Efecto 4,0 (lento)
- pulsedAPC Efecto 4,0 (rápido)
- pulsedAPC Efecto 4,0 (rápido)
- forcedAPC Efecto 6,0
- pulsedAPC Efecto 2,0 (rápido)

CONFIGURACIÓN DE  
MODOS EN  
APLICACIONES  
DIGESTIVO

erlbe